

NOTICE D'UTILISATION : TABOURET DE DOUCHE

REF 204039

Le tabouret de douche (réf. 204039) s'adapte à la taille de l'utilisateur grâce à ses 4 pieds réglables en hauteur. Son assemblage ne nécessite aucun outil. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions hors tout : 34 x 34 x (36-54) cm
- Hauteur sol / assise réglable : 36-54 cm
- Diamètre d'assise : 32 cm
- Couleur : Blanc
- Matière : Aluminium / PP
- Poids : 1,2 kg
- Poids maximum supporté : 100 kg

Instruction d'assemblage :

- Poser le siège du tabouret à l'envers sur une surface plane.
- Former la structure en assemblant les parties 1 et 2 (fig 1).
- Fixer la structure à l'aide des 4 vis (fig 2).
- Insérer les 4 pieds télescopiques au niveau de la structure de la chaise.
- S'assurer que les embouts en caoutchouc sont présents et correctement fixés.
- Régler la hauteur des pieds à l'aide des curseurs.

Attention : les 4 curseurs doivent être bien positionnés au même niveau sur les 4 pieds du tabouret.

Recommandations :

- Avant chaque utilisation, vérifier que les 4 pieds soient correctement réglés et les curseurs correctement enclenchés.
- S'assurer que le tabouret est bien positionné sur ses 4 pieds et stable.
- Attention : le sol doit être plan et non glissant. Les pieds du tabouret doivent adhérer au sol et ne pas glisser.
- L'assise doit être sèche pour éviter tout glissement.
- L'utilisateur ne doit pas présenter des troubles d'équilibre et doit pouvoir se tenir assis tout seul.
- Le tabouret ne doit pas être utilisé pour supporter une personne de plus de 100 kg.
- Ne pas se mettre debout sur le tabouret.
- Ne pas se tenir en équilibre sur les deux pieds arrière du tabouret.
- Ne jamais déplacer le tabouret lorsqu'une personne est assise dessus.

Entretien régulier :

- Essuyer le tabouret avec un chiffon doux après chaque utilisation.
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou à base d'eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit.
- Vérifier régulièrement les 4 pieds du tabouret. Les tubes ne doivent pas être rouillés ou endommagés.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies par les **Laboratoires Euromédis**.

Conditions de garantie :

Le produit est garanti 2 ans, dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l'accord des **Laboratoires Euromédis**. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.

