

## NOTICE D'UTILISATION : CHAISE DE DOUCHE

REF 204046

La chaise de douche (réf. 204046) a été spécialement conçue pour l'utilisation dans la douche. Elle s'adapte à la taille de l'utilisateur grâce à ses 4 pieds réglables en hauteur et peut facilement se transformer en tabouret de douche grâce à son dossier amovible en 1 clic. Le dossier est ajustable sur 3 positions. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

### Caractéristiques techniques :

- Dimensions hors tout : P.42 x l.41 x H.70/88 cm
- Dimensions assise : 50 x 30 cm
- Hauteur sol / assise réglable : 35 à 53 cm
- Couleur : Blanc
- Matière : Aluminium / PE
- Poids : 2,8 kg
- Poids maximum supporté : 100 kg

### Instruction d'assemblage :

- Poser le siège de la chaise à l'envers sur une surface plane.
- Former la structure en assemblant les parties 1 et 2 (fig 1).
- Fixer la structure à l'aide des 4 vis (fig 2).
- Insérer les 4 pieds télescopiques au niveau de la structure de la chaise.
- S'assurer que les embouts en caoutchouc sont présents et correctement fixés.
- Monter le dossier (fig 3)
- Emboîter dans la structure en passant dans les espaces prévus à cet effet (fig 4)
- Régler la hauteur des pieds à l'aide des curseurs.

Attention : les 4 curseurs doivent être bien positionnés au même niveau sur les 4 pieds de la chaise.

### Recommandations :

- Avant chaque utilisation, vérifier que les 4 pieds soient correctement réglés et les curseurs correctement enclenchés.
- S'assurer que la chaise est bien positionnée sur ses 4 pieds et stable.
- Attention : le sol doit être plan et non glissant. Les pieds de la chaise doivent adhérer au sol et ne pas glisser.
- L'assise doit être sèche pour éviter tout glissement.
- L'utilisateur ne doit pas présenter des troubles d'équilibre et doit pouvoir se tenir assis tout seul.
- La chaise ne doit pas être utilisée par une personne de plus de 100 kg.
- Ne pas se mettre debout sur la chaise.
- Ne pas se tenir en équilibre sur les deux pieds arrière de la chaise.
- Ne jamais déplacer la chaise lorsqu'une personne est assise dessus.

### Entretien régulier :

- Essuyer la chaise avec un chiffon doux après chaque utilisation.
- Éliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d'eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit.
- Vérifier régulièrement les 4 pieds de la chaise. Les tubes ne doivent pas être rouillés ou endommagés.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies par les **Laboratoires Euromédis**.

### Conditions de garantie :

Le produit est garanti 2 ans, dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l'accord des **Laboratoires Euromédis**. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.

