

NOTICE D'UTILISATION : ROLLATOR 2 ROUES VERT

REF 216102

Le rollator 2 roues (réf. 216102) s'adapte à la taille de l'utilisateur grâce à ses 4 pieds réglables en hauteur. Il est facilement pliable et permet d'obtenir un encombrement minimum. Son assemblage ne nécessite aucun outil. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions hors tout : P. 46 x l. 59 x H. 80/89,5 cm
- Hauteur assise / dossier : 55 - 66 cm
- Profondeur assise : 29 cm
- Couleur : Vert époxy
- Matière : métal
- Poids : 8.7 kg
- Poids maximum supporté : 100 kg
- Code LPP : **6256108**

Instruction d'assemblage :

- Le rollator est livré plié
- Déplier complètement. Blocage automatique avec picots dans les emplacements latéraux
- Appuyer sur deux ergots de sécurité pour le replier
- Siège relevable à accrocher avec support élastique en mode déplacement
- Régler la hauteur des pieds à l'aide des ergots des 4 pieds
- Attention : les 4 ergots doivent être bien enclenchés et positionnés au même niveau sur les 4 pieds du rollator



Recommandations :

- Avant chaque utilisation, vérifier que les 4 pieds sont correctement réglés (ergots enclenchés) et que le rollator est complètement déplié
- Le rollator ne doit pas être utilisée pour supporter une personne de plus de 100 kg
- Ne pas se mettre debout sur l'assise

Entretien régulier :

- Essuyer le rollator avec un chiffon doux
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d'eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit
- Vérifier régulièrement les 4 pieds du rollator et les roues. Les tubes ne doivent pas être rouillés ou endommagés
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies par les **Laboratoires Euromédis**

Conditions de garantie :

Le produit est garanti 2 ans, dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l'accord des **Laboratoires Euromédis**. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.



Rev 01 - 03.2022



Laboratoires Euromedis
ZA de la Tuilerie
60290 Neuilly Sous Clermont - France
www.laboratoires-euromedis.fr
Contact : sav.mad@euromedis.fr



Foshan Shunkangda Medical Tech co.,Ltd
Pingnan Industrial Area , Guicheng
Nanhai District , 528251 Foshan City,
Guangdong P.R. China



Sungo Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam, Netherlands