

## NOTICE D'UTILISATION : DÉAMBULATEUR PLIANT DEUX NIVEAUX

REF 216204

Le déambulateur pliant 2 niveaux (réf. 216204) s'adapte à la taille de l'utilisateur grâce à ses 4 pieds réglables en hauteur sur 8 positions. Il est facilement pliable et permet d'obtenir un encombrement minimum. Son assemblage ne nécessite aucun outil. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

### Caractéristiques techniques :

- Dimensions hors tout : P. 51 x l. 63,5 x H. 71/88 cm
- Hauteur maximale : 71 – 88 cm
- Dimension entre les deux poignées : 44 cm
- Matière : aluminium
- Poids : 2,3 kg
- Poids maximum supporté : 100 kg
- Code LPP : **6256108**

### Instruction d'assemblage :

- Le déambulateur est livré plié
  - Déplier complètement jusqu'au blocage automatique
  - Appuyer sur l'ergot central de sécurité pour le replier (fig 1).
  - Régler la hauteur des pieds à l'aide des ergots des 4 pieds (fig 2)
- Attention : les 4 ergots doivent être bien enclenchés et positionnés au même niveau sur les 4 pieds du déambulateur.



### Recommandations :

- Avant chaque utilisation, vérifier que les 4 pieds sont correctement réglés (ergots enclenchés) et que le déambulateur est complètement déplié en position sécurisée
- Ne doit pas être utilisée par une personne de plus de 100 kg

### Entretien régulier :

- Essuyer le déambulateur avec un chiffon doux
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d'eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit
- Vérifier régulièrement les 4 pieds du déambulateur. Les tubes ne doivent pas être rouillés ou endommagés
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies par les **Laboratoires Euromédis**



### Conditions de garantie :

Le produit est garanti 2 ans, dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l'accord des **Laboratoires Euromédis**. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.



Rev 01 - 03.2022



Laboratoires Euromedis  
ZA de la Tuilerie  
60290 Neuilly Sous Clermont - France  
www.laboratoires-euromedis.fr  
Contact : sav.mad@euromedis.fr



Foshan Shunkangda Medical Tech co.,Ltd  
Pingnan Industrial Area , Guicheng  
Nanhai District , 528251 Foshan City,  
Guangdong P.R. China



Sungo Europe B.V.  
Olympisch Stadion 24,  
1076DE Amsterdam, Netherlands