

# CANNE RÉGLABLE

## *Fantaisie*



**Importé par :**

Laboratoires Euromedis  
ZA de la Tuilerie  
60290 Neuilly Sous Clermont - France  
[www.laboratoires-euromedis.fr](http://www.laboratoires-euromedis.fr)  
Contact : [sav.mad@euromedis.fr](mailto:sav.mad@euromedis.fr)



Homecare Enterprise Co., Ltd.  
No.488, Lunmei Road, Changhua City,  
Changhua County 500 - Taiwan (R.O.C)



Y. Sung Handelsvertretung  
Dusselthaler Str.24  
40211 Dusseldorf - Germany

REF 203011



REF 203013



REF 203012



REF 203014



# CANNE RÉGLABLE

## *Fantaisie*

- Équipé d'une poignée droite en bois
- 10 hauteurs possibles de réglage pour s'adapter à des personnes de 1,52 à 1,95 m
- Ajustement sécurisé à l'aide d'un bouton-poussoir pour ajuster la poignée de la canne au niveau de votre poignet
- Baton en aluminium résistant Ø 2,22 cm, anticorrosion
- Embout amortissant et antidérapant pour plus de sécurité

### Pour régler la canne en hauteur :

- Dévisser la bague anti-bruit
- Appuyer sur le bouton-poussoir et relâcher à hauteur souhaitée
- Revisser la bague anti-bruit

### Conseil d'entretien :

- Nettoyer régulièrement la poignée et l'embout pour éviter tout glissement
- Remplacer immédiatement toute pièce endommagée

