

CHAISE DE DOUCHE 3 EN 1 CLARYS

REF 204013













Parties du produit

1. Dossier
2. Accoudoir
3. Siège
4. Seau
5. Roues avec freins
6. Levier de retrait du repose-pied
7. Repose-pieds

Garantie :

2 ans pour le cadre principal uniquement, hors consommables (roues, freins, etc.)

Plaque d'identification :

Nom du produit			
 REF	N° référence		Informations fabricant
 LOT	N° de lot		Informations distributeur et importateur
	Date de production et origine		Informations représentant européen
	Conformité Européenne		Matériel médical
	Attention		Consulter les instructions d'utilisation
Poids maximal utilisateur			Code EAN 13

Indications :

Indiqué lors d'une invalidité totale de la mobilité/de la marche/du transfert en cas de dommages structurels et/ou fonctionnels aux membres inférieurs (dont l'amputation, les séquelles de blessures, les troubles du mouvement musculo-squelettiques/neuro-musculo-squelettiques) et l'incapacité à déplacer un fauteuil roulant (par exemple en cas de force et de préhension limitées ou d'insuffisance de coordination des bras/des mains). Pour utilisation des toilettes et de la douche (la douche doit être conçue pour pouvoir accueillir un fauteuil de douche).

Consignes de sécurité

- Lire attentivement les instructions d'emploi qui suivent.
- L'ensemble des composants doit être examiné avant utilisation pour vérifier l'absence de dommage et la bonne fixation.
- Homologué pour un usage intérieur uniquement.
- Il y a un risque de pincement des vêtements ou de parties du corps lors de l'assise, de la levée, du positionnement du seau hygiénique ainsi qu'en levant les accoudoirs et en les mettant en place.
- En cas de nécessité de passer au-dessus de seuils, procéder doucement et avec précaution, afin d'éviter d'endommager les roues.
- Toujours utiliser les freins de parking lors de l'utilisation d'une chaise percée à roulettes.
- Lors du transfert dans/hors de la chaise percée à roulettes, les repose-pieds doivent être pivotés afin de ne pas occasionner une gêne.
- Ne jamais utiliser les repose-pieds comme appui pour se lever - risque de bascule !
- Éviter toute utilisation non autorisée, notamment par les enfants.
- Vérifier le poids maximum autorisé de l'utilisateur.
- Cette information se trouve dans les données techniques dans les instructions d'emploi ainsi que sur la plaque d'identification.

Montage

Insérer les quatre roues de 5" dans le tube d'assemblage sur le cadre dans la position souhaitée et fixer les roues avec les vis de réglage fournies.



Positionner le dossier pré-assemblé sur le socle et le fixer en tournant les vis Torx dans le sens des aiguilles d'une montre. Clipser l'assise au cadre. Insérer le seau par l'arrière dans le rail sous l'assise ; le tirer vers l'arrière pour le retirer après usage.

Accrocher les repose-pieds comme sur l'image et les faire pivoter vers l'intérieur jusqu'à entendre un clic indiquant qu'ils sont bien positionnés. Pour retirer les repose-pieds, ramener le levier vers l'intérieur et faire pivoter les repose-pieds sur le côté.

Positionner le couvercle sur l'assise.



Frein de parking double fonction

Descendre le levier pour activer le frein. La position directionnelle de la roue est bloquée en même temps.

Descendre le haut du levier pour ôter le frein.



Réglage de la hauteur des repose-pieds

Pour régler la hauteur des repose-pieds, desserrer tout d'abord la vis de fixation. Une fois basculés, la hauteur des repose-pieds peut être réglée. Serrer la vis de fixation.

IMPORTANT : Ne jamais utiliser les repose-pieds comme appui pour se lever !

Données techniques

Produit	Chaise percée à roulettes
N° produit	HE2082001P
Quantité par boîte (pièce)	1
Code LPP	6256261
POIDS	
Maximum utilisateur	250 lbs 113,63 kg
Produit	30 lbs 13,65 kg
Produit et boîte incluse	33,51 lbs 15,20 kg
DIMENSIONS	
Produit L X L X H	33,38 x 18,11 x (38,93-40,9) pouces 848 x 460 x (989-1039) mm
Siège L X L X H	17,44 x 17 x 1,96 pouces 443 x 432 x 50 mm
Diamètre roue avant	5 pouces 127 mm
Diamètre roue arrière	5 pouces 127 mm
Carton L X L X H	595 x 385 x 590 mm
MATIÈRES	
Dossier	Aluminium
Siège	PU + Planche en bois
Accoudoirs	PU + Q235 + Planche en bois
Roue avant	Pneu PA+TPR
Roue arrière	Pneu PA+TPR
Cadre	Aluminium
Couleur du cadre	Revêtement poudre (Blanc)



HEBEI Healthplus Medical Device Co., Ltd
No. 1, Chuangye Street,
Southwest Industrial District,
Matou ecological Industry Park
Handan City, Hebei Province, China



Y. Sung Handelsvertretung Dusselthaler
Str.24 - 40211 Dusseldorf - Germany



Laboratoires Euromédis
Z.A. de la Tuilerie
60290 Neuilly-sous-Clermont
France