

NOTICE D'UTILISATION : ROLLATOR 4 ROUES ALUMINIUM BARIATRIQUE

REF 216109

Le rollator 4 roues (réf.216109) est livré avec une assise confort, une barre dossier en mousse, un panier en toile, et deux poignées ergonomiques avec freins. Ce rollator en structure acier ultra-résistant convient particulièrement aux personnes âgées ou en situation de handicap de forte corpulence grâce à ses dimensions spécifiques. Il offre un appui sûr et prévient du risque de chutes au cours des sorties de la personne. Il est équipé d'une assise de repos en cas de fatigue et d'une barre de confort. Il est facilement pliable et permet d'obtenir un encombrement minimum. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions hors tout : P.80 x l. 71 x H.(86-100) cm
- Dimension plié : 50 cm
- Hauteur maximale : 86 – 100 cm
- Hauteur d'assise : 56 cm
- Largeur d'assise : 50 cm
- Profondeur d'assise : 33 cm
- Diamètre roulette : 19 cm
- Couleur : rouge
- Matière : acier
- Poids du produit : 14,5 kg
- Poids maximum supporté : 180 kg
- Code LPP : **6256108**

Instruction d'assemblage :

- Le rollator est livré plié.
- Déplier complètement.
- Glisser les deux poignées avec freins dans les tubulures adaptées.
- Ajuster la hauteur des poignées avec les deux écrous étoile et fixer en vissant.
- Attention : les 2 poignées doivent être positionnées au même niveau.
- Retirer les protections en plastique sur les roues.

Recommandations :

- Ce rollator ne peut être utilisé par des patients dont le poids excède 180 kg.
- L'utilisation de ce rollator sur un sol en pente ou irrégulier est à proscrire sous peine de basculement du patient.
- La première mise en service doit se faire avec une personne habilitée qui procédera aux réglages pour adapter le produit à la morphologie de l'utilisateur.
- Avant chaque utilisation, vérifier que le rollator est complètement déplié et verrouillé avec la butée centrale, et que les deux poignées sont correctement fixées et solidaires de la base.
- Positionner l'appareil devant soi et tenir les poignées tout en maintenant les freins.
- Libérer les freins lorsque le corps est en équilibre.
- Pour une station debout prolongée, immobiliser le rollator en poussant le frein vers le bas en position verrouillée (fig 1).

Entretien régulier :

- Essuyer le rollator avec un chiffon doux.
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d'Eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit.
- Vérifier régulièrement le serrage des poignées et l'efficacité du freinage.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies.

Conditions de garantie :

La structure mécanique de ce produit est garantie 2 ans, dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l'accord des **Laboratoires Euromedis**. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.



Rev 01 - 05.2022



Laboratoires Euromedis
ZA de la Tuilerie
60290 Neuilly Sous Clermont - France
www.laboratoires-euromedis.fr
Contact : sav.mad@euromedis.fr



HEBEI Healthplus Medical Device Co., Ltd
No. 1, Chuangye Street,
Southwest Industrial District,
Matou ecological Industry Park
Handan City, Hebei Province, China



Y. Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str.24
40211 Dusseldorf
Germany

Made in China